

**Stabimed® Ultra**

Dezinfectant de nivel inalt pentru instrumentar (procesare manuala)

**Recomandari:**

1. Purtati manusi si imbracaminte de protectie, urmati recomandari de reprocesare ale producatorului endoscopului sau ale dispozitivului medical ce urmeaza a fi reprocesat
2. Se dilueaza produsul concentrat in apa calduta (apa trebuie sa fie de cel putin calitatea apei potabile) pana la concentratia de lucru necesara (concentratia dorita vezi tabelul cu eficacitatea antimicrobiana.
3. Se amesteca usor solutia de cateva ori pe un timp de activare de 10 minute.
4. Cantitati mici de granulat nedizolvate nu afecteaza activitatea solutiei de lucru ci reprezinta un depozit de activare eficient pentru aceasta.
5. Pentru eficacitate completa si activitate impotriva **bacteriilor, sporilor de bacterii, mico-bacteriilor, fungilor, virusurilor incapsulati si neincapsulati, la timpul de expunere de 10 MINUTE, concentratia de lucru este de 2%**

**2% / 10 MINUTE**

**Instructiuni:**

Dezinfectarea si curatarea instrumentelor chirurgicale, a endoscoapelor rigide si flexibile, a echipamentelor de laborator si de anestezie. Adecvat pentru curatarea in masina cu ultrasunete.

Pentru pregatirea si dezinfectarea finala a instrumentelor termosensibile si a echipamentelor flexibile cum sunt endoscoapele.

Dupa dezinfectare, clatiti bine instrumentele cu apa si procedati dupa cum este necesar.

**Pasul 1:** Umpleti recipientul cu apa calduta de la robinet pana la volumul necesar de lucru

**Pasul 2:** Adaugati pulbere in apa folosind capacul dozator.

**Exemple de dozare:**

Măsură dozatoare	Stabimed® ultra	soluție gata de utilizare
~25 ml	20 g	1 l / 2%
~50 ml	40 g	2 l / 2%
~75 ml	60 g	3 l / 2%
~150 ml	120 g	6 l / 2%
~200 ml	160 g	8 l / 2%

**Pasul 3:** Amestecati pana cand pulberea se dizolva sub forma unei solutii clare (~10 minute)

**Pasul 4:** Solutia se arunca dupa 24 de ore sau atunci cand este vizibil murdara din cauza riscului de scadere a concentratiei

**Nota:** capacul dozator utilizat este doar cel care insoteste produsul la livrare. Urmarii gradarea in unitate metrica conform tabelului de mai sus.