

Uro-Tainer®

0,9 % NaCl / Solutio R / Suby G

Soluție de întreținere pentru catetere uretrale și suprapubiene

1. Ce este Uro Tainer® și pentru ce se utilizează:

Uro-Tainer® sunt soluții pentru întreținerea cateterelelor uretrale și suprapubiene permanente. Ele sunt dispozitive medicale sterile, fără endotoxine, gata de utilizare, într-o pungă fără PVC și au următorul scop:

- Uro-Tainer® 0,9% NaCl: Pentru o curățare de rutină a cateterelelor (îndepărtarea de cheaguri mici de sânge, țesut, nisip).
- Uro-Tainer® Solutio R: Dizolvarea încrustațiilor persistente, tratamentul cateterelelor încrustate pentru a reduce trauma în timpul îndepărtării acestora.
- Uro-Tainer® Suby G: Dizolvarea încrustațiilor.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Uro-Tainer®

Nu utilizați Uro-Tainer®

În caz de hipersensibilitate (alergie) la oricare dintre ingredientele soluției (enumerare la punctul 6). În caz de cistită sau alte afecțiuni uro-genitale, care pot produce hematurie (sânge în urină). La câteva zile după o intervenție chirurgicală asupra vezicii urinare sau ale tractului urinar.

Atenționări și precauții

- Discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală înainte de a utiliza Uro-Tainer®.
- În nici un caz nu trebuie să fie injectată sau perfuzată.
- Instilați soluția prin alimentare gravitațională, pentru a evita utilizarea forței.
- Se aplică cu ajutorul unei tehnici aseptice. Se recomandă dezinfectia portului, înainte de utilizare.
- A se utiliza numai în cazul în care recipientul și capacul de etanșare sunt intacte, iar soluția este limpede.
- Acesta este un sistem de unică folosință. După deschidere, acesta trebuie să fie utilizat și eliminat cu promptitudine. Reutilizarea creează un risc potențial pentru pacient sau utilizator. Aceasta poate duce la o contaminare și / sau funcționalitate limitată a dispozitivului, care cauzează un prejudiciu, boala sau decesul pacientului.
- Aruncați în mod corespunzător după utilizare.
- Dacă apar scurgeri de soluție din uretră în timpul procesului de spălare, cateterul nu este plasat corect în vezica urinară. În acest caz, cateterul trebuie să fie înlocuit cu unul nou.
- Dacă soluția nu curge, cateterul poate fi îndoit sau înfundat. În acest caz, cateterul trebuie să fie înlocuit cu unul nou.
- Trebuie să luați măsuri de precauție când sunt operați pacienții cu leziuni asupra coloanei vertebrale datorită riscului de disreflexie autonomă.

3. Cum să utilizați Uro-Tainer®

- Uro-Tainer® sunt sisteme închise și sterile pentru a fi conectate la cateter urinar și să fie folosite în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe pagina următoare.

- Uro-Tainer® plic este furnizat steril și nu ar trebui să fie scos din ambalajul acestuia până în momentul utilizării.
 - Dacă se dorește, se aduce soluția până la temperatura corpului prin imersarea plicului învelit în ambalajul său în apă caldă.
- Punga care conține soluția de curățare colectează lichidul după spălarea cateterului. Curățarea cateterului și colectarea lichidului după clătire se realizează numai prin gravitație, prin menținerea dispozitivului deasupra și sub nivelul vezicii urinare, respectiv.
- Uro-Tainer® 0,9% NaCl, care acționează cu un efect de curățare mecanică, poate fi administrat ca aplicare „înăuntru și afară”, în timp ce Uro-Tainer® Suby G și Solutio R, bazate pe soluții acide, trebuie să fie administrat în cateter și lăsat acolo timp de 5 minute pentru a exploata pe deplin acțiunea lor chimică. Acest procedeu este recomandat de 1 - 2 ori pe zi.
- În general, utilizarea de zi cu zi este indicată doar pentru pacienții post-operatorii pe parcursul unei perioade scurte. Spre deosebire de acestea, pacienții cateterizați pe termen lung au catetere pentru perioade foarte lungi de timp. În acest caz, cateterul este clătit numai cu Uro-Tainer® de 2-3 pe săptămână.
- Dacă utilizați Uro-Tainer® mai des decât trebuie, nu sunt așteptate efecte adverse.

4. Reacții adverse posibile

Acidul citric poate provoca la unii pacienți o ușoară iritație și chiar durere temporară, o senzație de arsură, sau spasme ale vezicii urinare (dorința de a urina). În cazul în care apar aceste efecte, se recomandă folosirea soluției mai puțin concentrată Suby G, se efectuează instilația mai puțin frecvent, sau se alternează cu o instilare de NaCl 0,9%, pentru că pentru această soluție nu se cunosc astfel de efecte adverse.

5. Cum se păstrează Uro-Tainer®

A nu se păstra Uro-Tainer® la vederea și îndemâna copiilor. Nu utilizați Uro-Tainer® după data de expirare înscrisă pe ambalajul exterior din plastic.

A nu se păstra la frigider sau congelat.

A se păstra în ambalajul original.

Folosiți numai soluții clare în recipiente intacte.

După deschidere, Uro-Tainer® trebuie să fie utilizat și eliminat cu promptitudine.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Uro Tainer®

- Uro-Tainer® 0,9 % NaCl
100 ml soluție conține: Clorură de sodiu 0,9 g în apă pentru preparate injectabile.
- Uro-Tainer® Solutio R
100 ml de soluție conține: Acid citric monohidrat 6,0 g, gluconolactonă, carbonat de magneziu slab, edetat disodic dihidrat în apă pentru preparate injectabile.

c) Uro-Tainer® Suby G

100 ml soluție conține: Acid citric monohidrat 3,23 g, oxid de magneziu slab, bicarbonat de sodiu, edetat disodic dihidrat în apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Uro Tainer® și conținutul ambalajului Soluția apare ca un lichid limpede și incolor. Uro-Tainer® sunt realizate dintr-un sac moale, fără poli (clorură de vinil) (PVC), sudată cu un tub flexibil fără PVC și o închidere urologica. Materialul de sac utilizat este un film de uz farmaceutic, incolor și transparent.

Uro-Tainer® sunt disponibile în ambalaje de dimensiuni de 50 ml și 100 ml.


Distribuitor:

B. Braun Medical S.R.L.
Remetea Mare nr. 636 DN 6,
km 546+400 dreapta
307350 Timiș, România
Tel. 0256 28 49 05
www.bbraun.ro


Acest prospect a fost revizuit în 09/2016.

STERILE 


1. Rupeți folia protectoare și scoateți Uro Tainer® plic.

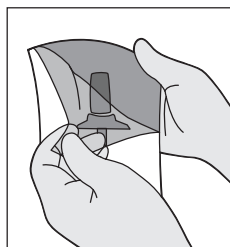


5. Se introduce conectorul în pâlnia cateterului.

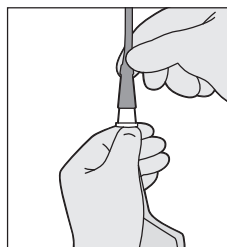


2. Închideți tubul Uro-Tainer® cu clemă de plastic.

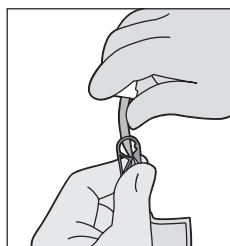

6. Ținând Uro-Tainer® deasupra nivelului vezicii urinare, eliberați clema pentru a permite fluidului să se scurgă în vezică prin forța gravitațională.

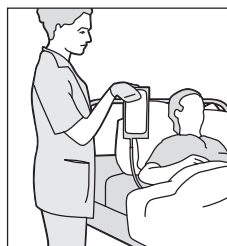


3. Îndepărtați sigiliul.

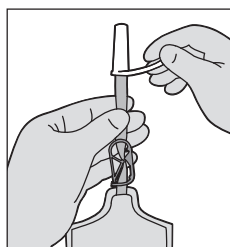

7. După 5 minute, coborâți Uro-Tainer® sub nivelul vezicii urinare pentru a se scurge lichidul înapoi în sac.



4. Răsuciți și extrageți capacul fără a atinge conectorul steril.

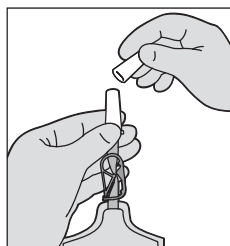

8. Clampați tubul și scoateți conectorul din cateter prin rotirea ușoară. Conectați cateterul la un sac de drenaj steril. Aruncați Uro-Tainer® plic și spălați-vă pe mâini.

